

unica

kit de chirurgie ghidată

Un singur frezaj. Opritor unic. Un implant.




Made in Italy

REVOLUȚIA ÎN CHIRURGIA COMPUTERIZATĂ GHIDATĂ

A început o nouă eră în chirurgia ghidată.

Unica: o singură freză pentru fiecare diametru de implant și tip de os (mandibulă sau maxilar), combinată cu un set revoluționar de opritoare pentru a atinge lungimile dorite.

Acest kit chirurgical unic și în curs de brevetare este compatibil cu implanturi de 3,2, 3,7 și 4,3 mm din toate liniile JDentalCare.

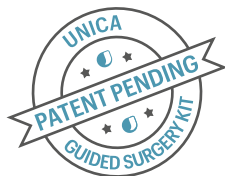


O revoluție în protocoalele de chirurgie computerizată ghidată, concepută pentru a reduce complexitatea și a crește precizia în practica zilnică.



UNICA-FREZĂ

O freză Unica pentru fiecare diametru de implant, pentru o osteotomie rapidă și previzibilă.

Vârfurile frezelor urmează profilul implantului, pentru a crea un spațiu perfect pentru implantul dorit.

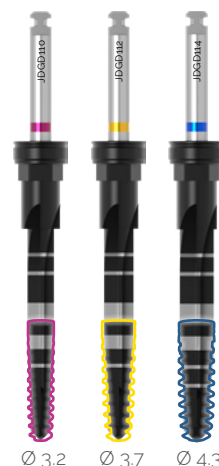

UNICA-LIMITATOR DE FREZĂ

Un Limitator Unica pentru fiecare lungime de implant dorită (10 – 18 mm).

Opritoarele inițiale Unica (6 și 8 mm) sunt concepute pentru a ghida osteotomia încă de la început. O singură freză Unica asociată cu opritorul de lungimea dorită va crea osteotomia ghidată perfectă pentru implantul ales.



UNICA-FREZA POST-EXTRACTIVĂ

Cele trei freze post-extractive, datorită vârfului lor rotunjit, diamantat și cu mare capacitate abrazivă, pot străpunge peretele osos al alveolei fără să devieze, chiar și în cazul unui os dur și înclinat. Aceasta asigură o înclinație precisă a osteotomiei, corespunzătoare planificării realizate cu software-ul de chirurgie ghidată computerizată.

PROCEDURĂ SIMPLĂ ÎN 3 PAȘI

Urmează trei pași simpli pentru a alege freza potrivită pentru intervenția chirurgicală pe care o vei realiza.

**1 IDENTIFICĂ
LOCUL OPERAȚIEI
ȘI TIPUL OSULUI**

Mandibulă / Maxilar
Moale / Mediu / Dens

**2 ALEGE DIAMETRUL
IMPLANTULUI**

Ø3,2 / Ø3,7 / Ø4,3 mm

**3 SELECTEAZĂ
UNICA - FREZA**


Începe osteotomia
folosind opritoare
Unica până la lungimea
finală dorită.

CATALOG DE PRODUSE

Kit:


JKDIT07

Guided Surgery Kit Unica

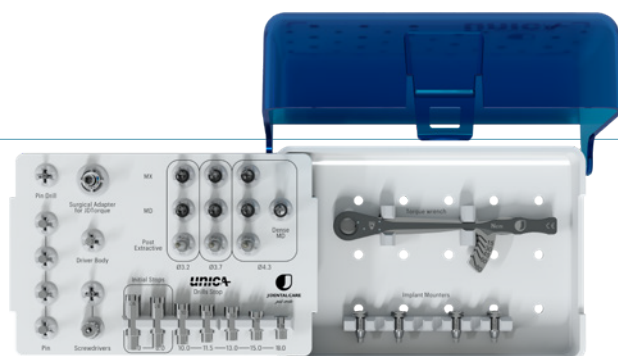

Freze:

JDGD110	Guided Drill Unica Ø 3.2 MD
JDGD111	Guided Drill Unica Ø 3.2 MX
JDGD112	Guided Drill Unica Ø 3.7 MD
JDGD113	Guided Drill Unica Ø 3.7 MX
JDGD114	Guided Drill Unica Ø 4.3 MD
JDGD115	Guided Drill Unica Ø 4.3 DMD
JDGD116	Guided Drill Unica Ø 4.3 MX
JDDIADR102	Post-Extractive Guided Drill Unica Ø 3.2
JDDIADR103	Post-Extractive Guided Drill Unica Ø 3.7
JDDIADR104	Post-Extractive Guided Drill Unica Ø 4.3

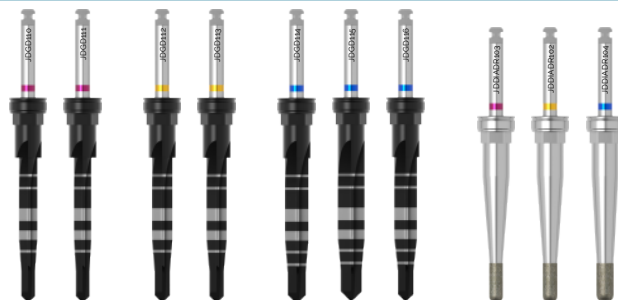

Opritoare pentru freze:

JDODGDST060	Unica Initial Drill Stop L 6
JDODGDST080	Unica Initial Drill Stop L 8
JDODGDST100	Unica Drill Stop L 10
JDODGDST115	Unica Drill Stop L 11.5
JDODGDST130	Unica Drill Stop L 13
JDODGDST150	Unica Drill Stop L 15
JDODGDST180	Unica Drill Stop L 18



Instrumente:

EVIDG	Driver Body for Guided Surgery
EVSPD25	Prosthetic Driver L 25
EVSPDF25	Prosthetic Driver for JDTorque L 25
JDGP	Guided Surgery Precision Drill
JDPIN	Fixation Pin
JDTWA	Surgical Adapter for JDTorque
JDTW	Torque Wrench JDTorque

NOTĂ: Suporturile pentru implanturi vor fi furnizate compatibile cu implantul ales.



PROTOCOL DE FREZARE

Un protocol simplificat și predictibil de frezare pentru chirurgia ghidată. Se recomandă respectarea indicațiilor următoarei secvențe de frezare pentru a asigura stabilitatea primară optimă a implantului.

DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE	OS MEDIU-DENS	OS DENS
Pregătirea situsului în maxilar			
Ø 3.2	3.2 MX	3.2 MX	3.2 MX 3.7 MX (half length)
Ø 3.7	3.2 MX	3.7 MX	3.7 MX 4.3 MX (half length)
Ø 4.3	3.7 MX	4.3 MX	4.3 MX 4.3 MD (half length)
Pregătirea situsului în mandibulă			
Ø 3.2	3.2 MD	3.2 MD	3.7 MD
Ø 3.7	3.2 MD	3.7 MD	4.3 MD
Ø 4.3	3.7 MD	4.3 MD	4.3 MD 4.3 DMD (half length)



Notă: Toate dimensiunile diametrelor sunt indicate în mm.


FREZE POST-EXTRACȚIE

Aceste freze se utilizează în timpul chirurgiei ghidate în cazuri post-extracționale.

Se folosesc opritoarele Unica pentru a atinge lungimea dorită a implantului, utilizând toate opritoarele, de la cel mai lung până la cel mai scurt.

Instrucțiuni:

1. Introdu freza post-extracție Unica, în opritor, în alveolă și aplică presiune alternativă (mișcări în sus și în jos). Utilizează-le cu 2000 rpm și irigare.
2. Folosește freza Unica corespunzătoare pentru a completa osteotomia.

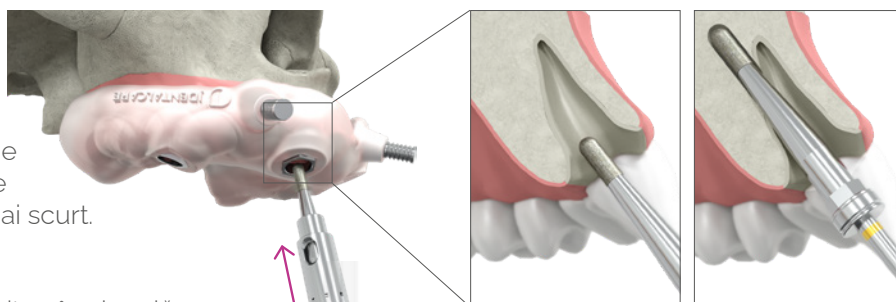


perforarea peretelui osos al alveolei pentru a obține înclinația corectă

OSTEOTOMIE LIBERĂ

Frezele Unica pot fi utilizate și liber, fără ghid.

Introdu freza până la lungimea dorită a implantului, datorită marcajelor laser de adâncime de pe freză.

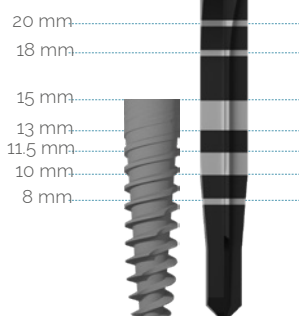

Notă:

JDentalCare, logo-ul JDentalCare și alte mărci comerciale menționate în acest document sunt proprietatea JDentalCare. Produsele prezentate în această broșură pot să nu fie toate disponibile sau autorizate în toate țările. Pentru mai multe informații despre produse, disponibilitate și instrucțiuni, contactează distribuitorul local JDentalCare. Utilizare exclusiv pe bază de prescripție medicală.